



معاونت درمان

www.ta.mui.ac.ir

# راهنمای استفاده و نگهداری از دستگاه ساکشن



دسترسی به راهنمای استفاده از دستگاه را حتماً قبل از استفاده از دستگاه مطالعه نمایید .

## نکات مهم

- لازم است در ابتدا جهت اطمینان از صحت عملکرد دستگاه، پس از اتصال لوازم جانبی دستگاه، ورودی شیلنگ بیمار را مسدود کرده و مقدار فشار روی **gauge** را کنترل نمایید که فشار بیش از **۶۰kpa** مورد قبول می باشد.
- سپس مقدار و کیوم مورد نیاز را تنظیم و بعد مورد استفاده قرار دهید.
- هنگامی که مایعات در ظرف جمع آوری به علامت ماکزیمم رسید دستگاه را خاموش کرده و کانکشن ظرف را بروی ظرف دیگر انتقال دهید.
- ظرف سرریز همواره بعنوان یک وسیله حفاظتی برای جلوگیری از ورود مایعات به موتور دستگاه می باشد نباید هیچگونه محلول یا خونابه در آن وارد گردد.
- فیلتر باکتری مورد استفاده در دستگاه یکبار مصرف می باشد. پس از ایجاد مقاومت بیش از **۱۰kpa** و یا پاره شدن و یا نفوذ مایعات تعویض گردد.
- عدم استفاده از فیلتر باکتری باعث ایجاد آلودگی های محیطی و انتشار بیماریها می شود.
- لوله های یکبار مصرف سیلیکون بهترین حالت جهت استفاده از ساکشن می باشد که باید برای هر بیمار تعویض گردد.
- عدم تنظیم صحیح (رگولاتور تنظیم و کیوم بیش از حد مورد نیاز) باعث بروز آسیب جدی برای بیمار می شود.
- در صورت شنیدن صدای غیر عادی دستگاه را خاموش کرده و به مسئول مربوطه اطلاع دهید.

## اقدامات لازم جهت شستشوی دستگاه:

- جهت تمیز و ضد عفونی کردن، دستگاه را از برق شهر جدا کنید.
- ظرف جمع آوری مایع بدون در نظر گرفتن مقدار مایع آسپیره شده، بایستی بطور روزانه تخلیه و تمیز شده و به صورت خشک نگهداری گردد.
- ظرف جمع آوری مایع و سرریز و در صورت نیاز شیلنگ های مربوطه به همراه شیرهای قطع کن را ابتدا با مواد شوینده تمیز کرده و سپس با مواد ضد عفونی کننده تایید شده ضد عفونی نمایید. بدیهی است این ظروف جزء وسایل غیر بحرانی (noncritical) تلقی می شوند.
- کلیه مراحل شستشو و ضد عفونی باید زیر نظر مسئول کنترل عفونت انجام شود.

اداره تجهیزات پزشکی