

## کلیدهای دستگاه ونتیلاتور مارک Raphael مدل Hamilton



### کلید اطلاعات عددی مربوط به بیمار

۱۹ پارامتر حیاتی مربوط به بیمار را نشان می دهد.



### کلید انتخاب منحنی ها

جهت انتخاب و نمایش یکی از منحنی های موجود استفاده می شود.



### کلید انجام تستها

جهت انجام تستهای Tightness Test (عدم نشتی تیوبینگ) ، تست فلوسنسور ، کالیبراسیون سنسور اکسیژن ، نمایش

میزان شارژ بودن باتری های داخلی و

تنظیم میزان شفافیت صفحه نمایش می باشد.

### کلید خاموش کردن آلام



صدای آلام شنیداری را بمدت ۲ دقیقه قطع می کند.

### کلید اکسیژن ۱۰۰٪



به مدت ۴ دقیقه اکسیژن خالص ۱۰۰٪ را به مریض ارائه می دهد.

### کلید دو منظوره (حبس هوای دم / تنفس مکانیکی بصورت دستی)



- با فشردن و نگاه داشتن این کلید می توانید در فاز دم ، ریه را در حالت پر شده نگه دارید.

- با هر بار فشردن و رها کردن ، یک تنفس مکانیکی در همان لحظه به مریض ارائه می شود.

### کلید نبولایزر



این کلید عمل نبوله کردن در فاز دمی را به مدت ۳۰ دقیقه فعال می کند.

### کلید آماده باش



دستگاه را در حالت آماده باش قرار می دهد.

نحوه نصب تیوپینگ تنفسی بیمار

