

دستورالعمل سریع کاربری دستگاه ونتیلاتور

مارک: Bennett مدل: 760

توجه: این مجموعه گردآوری شده، ترجمه مختصری از دفترچه راهنمای کامل اپراتوری به زبان انگلیسی دستگاه می باشد و مطالعه کامل دفترچه راهنمای آن الزامی می باشد.

نحوه عملکرد دستگاه:

ابتدا دستگاه را با دکمه on/off پشت آن روشن می کنیم و تمام اتصالات دستگاه را به بیمار وصل می کنیم دقت شود که ادپتور اکسیژن حتما باید به سانترال وصل باشد سپس تنظیمات دستگاه را مطابق به نظر پزشک انجام می دهیم.

این دستگاه شامل سه قسمت است قسمت Patient Data که در سمت چپ صفحه و با رنگ سبز نمایش داده شده است که مربوط به اطلاعات بیمار از جمله مجموع تعداد تنفس بیمار، مقادیر حجم ها و ... می باشد که بعد از وصل کردن دستگاه به بیمار خود به خود روی دستگاه مطابق با وضعیت بیمار نمایش داده می شود. در پایین این قسمت Alarm Setting وجود دارد که محدودیت آلارمها را به وسیله این کلیدها تنظیم می کنیم برای تنظیم این محدودیت ها ابتدا باید کلید مورد نظر را فشرده و سپس به وسیله کلید چرخان مقدار آن را تنظیم کنیم و سپس دکمه Accept را فشار دهیم.

در قسمت وسط صفحه دستگاه Ventilator Setting وجود دارد که با رنگ آبی نمایش داده شده است این قسمت مربوط به تنظیمات خود دستگاه است در بالای این قسمت سه مد A/C و SIMV و Spont وجود دارد هر مدی را که انتخاب کردیم کنار دکمه های مربوط به آن مد چراغی روشن می شود که به ما نشان می دهد برای این مد باید تمام این دکمه ها را تنظیم کنیم تنظیمات باید مطابق با نظر پزشک باشد در همین صفحه دکمه Menu وجود دارد که با فشردن آن بر روی صفحه نمایشگر دستگاه گزینه هایی نمایش داده می شود که شماره ۵ این گزینه ها Oxygen Sensor می باشد که با آوردن آن و فشردن Accept سنسور اکسیژن کالیبره می شود.

در قسمت راست صفحه دستگاه Ventilator Status می باشد که کلیدهای راهنمای دستگاه از جمله نمایشگر آلارم، قطع آلارم، ریست آلارم، کلید پر یا خالی بودن باتری دستگاه و ... وجود دارد.